



OPER FILM PROTECT

DESCRIPTION :

L'OPER FILM PROTECT est un pansement stérile en film de polyuréthane transparent avec adhésif acrylique et cadre de pose.

PROPRIETES :

Le pansement est basé sur un film semi-perméable, laissant passer l'oxygène et la vapeur d'eau et imperméable aux liquides. Cela permet d'agir sur le micro-environnement de la plaie en créant un milieu humide qui favorise la guérison de celle-ci.

Le film en polyuréthane est élastique, adaptable, et agit comme une barrière contre les fluides et la contamination microbienne, en protégeant efficacement la plaie contre les infections.

La transparence du film permet de visualiser le processus de guérison de la plaie.

L'élasticité élevée du film permet une adaptation correcte aux lignes du corps en scellant les bords de la plaie.

Le cadre de pose permet une mise en place facile et précise en maintenant le pansement étendu pendant sa fixation sur la peau.

MODE D'APPLICATION :

1. Sélectionner la taille de pansement adéquate en laissant une marge pour qu'il adhère à la peau saine et sèche à la périphérie de la plaie ou du point de ponction du cathéter.
2. Nettoyer, désinfecter et sécher de manière adéquate la plaie ainsi que le contour de cette dernière avant d'appliquer le pansement. En cas d'utilisation de désinfectants, crème ou savons, s'assurer que la peau est bien propre et sèche.
3. Couper les poils en excès au site d'application du pansement, il est recommandé de ne pas raser la zone.
4. Laisser toutes les solutions antiseptiques sécher complètement avant d'appliquer le pansement, afin de prévenir l'irritation de la peau et améliorer son adhésion.
5. Vérifier l'intégrité de l'enveloppe avant ouverture. Ne pas utiliser si elle est ouverte ou endommagée.
6. Ouvrir l'enveloppe et en retirer le pansement dans des conditions aseptiques.
7. Retirer le papier imprimé qui protège la surface adhésive du pansement.
8. Centrer le pansement sur la plaie.
9. Appliquer le pansement doucement, sans exercer un étirement excessif du film.
10. Retirer le cadre lentement, tout en aplatissant les bords du pansement
11. Aplatir le pansement du centre vers les bords en appliquant une pression ferme afin d'améliorer l'adhésion.
12. Pour les références de produit fournies avec des étiquettes d'identification, noter les informations et placer la bande avec le pansement.

SUIVI :

En cas d'infection de la plaie ou d'infection suspectée pendant l'utilisation du pansement, agir sous supervision médicale.

Changer le pansement si ses propriétés protectrices sont affectées (par exemple s'il est détaché ou perforé par les sutures ou autres dispositifs médicaux) ou selon le protocole de travail.

La fréquence de remplacement du pansement devra être déterminée par des professionnels de la santé qualifiés. Toutefois, à titre d'indication, le pansement peut rester jusqu'à 7 jours en contact avec le patient dans des conditions normales d'utilisation.

RETRAIT DU PANSEMENT :

Lever lentement le pansement par l'un de ses bords et tirer doucement sur le film le long de la peau dans le sens de pousse des poils. Il faut faire attention à ne pas débrancher les cathéters ou aucun autre dispositif.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer avec une tension modérée pour éviter d'éventuels traumatismes de la peau.

RISQUES LIES A UNE REUTILISATION :

La réutilisation du produit peut compromettre l'intégrité structurelle de ce dernier, et créer des risques de contamination et/ou d'infection.

CONTRE INDICATIONS :

- Plaies cavitaires affectant les tendons et/ou les os.
- Les patients présentant une possibilité de réactions allergiques aux composants du produit.
- Une utilisation en tant que pansement primaire pour les plaies infectées ou les brûlures du deuxième ou troisième degré.